		Data 1ª versão: 20/05/2019
		Ult. Revisão: 07/10/2021
HOSPITAL PORTO DIAS		Vencimento: 07/10/2023
		Versão: 02
		Nº Páginas: 1/3
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES NA MEDICINA HIPERBÁRICA	
	HPD-HIP-POP-01	

1. OBJETIVO

Promover segurança, higiene e conforto aos pacientes e a equipe multiprofissional no serviço de Medicina Hiperbárica.

2. RESPONSABILIDADES

2.1. TÉCNICO DE HIGIENIZAÇÃO

Realizar as limpezas concorrente, terminal e imediata de áreas internas e externas pertencentes ao setor de medicina hiperbárica. Repor materiais de consumo diário de limpeza.

2.2. EQUIPE DA MEDICINA HIPERBÁRICA

Organização do setor, recolhimento de materiais perfurocortantes e retirada dos equipamentos respiratórios do interior da câmara após cada sessão.

3. ABRANGÊNCIA

Medicina Hiperbárica.


4. DESCRIÇÃO

4.1. HIGIENIZAÇÃO DA CAMARA HIPERBÁRICA

O técnico de enfermagem deverá desmontar as máscaras de respiração após cada sessão, e encaminhar para CME que realizará a limpeza, desinfecção e esterilização, deve ser lavado com água e sabão, preferencialmente com detergente enzimático e requer desinfecção de acordo com as normas do serviço.

O técnico de enfermagem deverá retirar as roupas da maca, colocar no saco azul que será recolhido pelo coletor para encaminhar a lavanderia.

Elaboração e Revisão: Enf. ^a Alessandra Ramos Coordenação de Hemodinâmica e Hiperbárica	Validação: Enf. ^a Letícia Carvalho Assessoria da Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Drielly Costa Assessoria da Qualidade
---	--	---

 		Data 1ª versão: 20/05/2019
		Ult. Revisão: 07/10/2021
HOSPITAL PORTO DIAS		Vencimento: 07/10/2023
		Versão: 02
		Nº Páginas: 2/3
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES NA MEDICINA HIPERBÁRICA	
	HPD-HIP-POP-01	

O técnico de higienização realizará a limpeza concorrente ao término de cada sessão, das paredes da câmara, vigias, padiola, cadeiras, das guias de oxigênio e piso. A limpeza deverá ser realizada com pano umedecido com água, sabão e peróxido de hidrogênio ou quaternário de amônia.

Nunca usar produtos abrasivos, Tóxicos, ácidos, inflamáveis ou a base de petróleo para limpeza, exceto as especificadas pelo fabricante (citados acima)

A Limpeza da mesa de comando deve ser realizada às 17h ou sempre que solicitado, utilizar pano umedecido com álcool a 70% ou peróxido de hidrogênio.

A limpeza terminal deverá ser realizada semanalmente (toda quinta-feira) com a retirada das placas do piso para lavagem da câmara e antecâmara, obedecendo à ordem: teto, parede, vigias, poltronas, tubulações, base e piso. O procedimento deverá ser feito de cima para baixo e de dentro para fora, deve ser registrado pelo técnico de higienização e validado pela equipe de enfermagem.

4.2. HIGIENIZAÇÃO DO SETOR

A limpeza concorrente é realizada diariamente no salão da câmara, copa, DML, banheiros, recepção, consultório e sala de curativo e deve ser registrado pelo técnico de higienização e validado pela equipe de enfermagem.

O técnico de higienização realizará a coleta de resíduos e roupa, sempre que necessário, não deixando ultrapassar o volume de 2/3 da lixeira e encaminhará os resíduos a sala de guarda lixo, e encaminhará o enxoval sujo para a área suja.

O técnico de higienização realizará higienização terminal 01 vez ao dia na sala de curativo e consultório. Deverá realizar a concorrente diariamente no início do plantão e sempre que necessário.

Elaboração e Revisão: Enf. ^a Alessandra Ramos Coordenação de Hemodinâmica e Hiperbárica	Validação: Enf. ^a Letícia Carvalho Assessoria da Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Drielly Costa Assessoria da Qualidade
---	--	---

 		Data 1ª versão: 20/05/2019
		Ult. Revisão: 07/10/2021
HOSPITAL PORTO DIAS		Vencimento: 07/10/2023
		Versão: 02
		Nº Páginas: 3/3
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES NA MEDICINA HIPERBÁRICA	
	HPD-HIP-POP-01	

A limpeza terminal em todo setor deverá ser realizada 02 vezes na semana, dias de terça e sábado.

5. REFERÊNCIAS

Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica: diretrizes de segurança qualidade e ética. 6ª Edição, São Paulo; 2016-2018.

6. ANEXOS

Não se aplica.

7. QUADRO RECAPITULATIVO

Descrição da Revisão	Versão	Data
Emissão inicial	01	20/05/2019
Revisão Geral das rotinas	02	07/10/2021

Elaboração e Revisão: Enf. ^a Alessandra Ramos Coordenação de Hemodinâmica e Hiperbárica	Validação: Enf. ^a Letícia Carvalho Assessoria da Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Drielly Costa Assessoria da Qualidade
---	--	---